



Defibrylator AED iPAD SP1



Producent: iPAD

Nr katalogowy: IPA SP1

Informacje

Defibrylator AED iPAD SP1 od CU Medical to jedno z najbardziej zaawansowanych, a jednocześnie najprostszych w obsłudze urządzeń ratujących życie na rynku. Dzięki swojej niezawodności, intuicyjności oraz pancernej obudowie stał się ulubieńcem zarówno brytyjskich służb medycznych (NHS), jak i jednostek Straży Pożarnej oraz ratowników na całym świecie. Urządzenie samodzielnie analizuje rytm serca poszkodowanego z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) i krok po kroku prowadzi użytkownika przez procedurę Basic Life Support (BLS). To idealny defibrylator do przestrzeni publicznej, zakładów pracy oraz na wyposażenie służb mundurowych.

Opis produktu

Defibrylator AED iPAD SP1 (CU Medical)

1. Kluczowe innowacje i funkcje ratunkowe

Defibrylator iPAD SP1 został zaprojektowany w taki sposób, aby wspierać ratownika – zarówno wykwalifikowanego strażaka, jak i przypadkowego świadka zdarzenia – w najbardziej stresujących momentach.

- **Bezkosztowy tryb pediatryczny:** Przejście na tryb ratowania dziecka (poniżej 25 kg) odbywa się za pomocą jednego suwaka. Urządzenie automatycznie redukuje energię wyładowania do 50 J. Nie musisz tracić cennego czasu i pieniędzy na przepinanie specjalnych elektrod pediatrycznych – używasz tych samych, uniwersalnych podkładek!
- **Automatyczne dostosowanie głośności (Auto-Volume):** Urządzenie posiada mikrofon badający poziom hałasu w otoczeniu. Jeśli działasz na ruchliwej ulicy, w hali produkcyjnej czy przy pracującej autopompie, iPAD SP1 automatycznie podgłośni komendy, aby były zawsze wyraźnie słyszalne.
- **Asystent RKO z metronomem:** Wyraźne instrukcje głosowe oraz wbudowany metronom nadają idealne tempo uciśnięć klatki piersiowej, co drastycznie podnosi jakość prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
- **Niezawodność i testy auto-diagnostyczne:** Urządzenie każdego dnia samo sprawdza swój stan techniczny, czas pracy oraz poziom baterii. Czytelny wyświetlacz LCD natychmiast informuje o pełnej gotowości do działania.

2. Półautomatyczny defibrylator AED – dla kogo i gdzie?

Użycie defibrylatora AED jest banalnie proste. Urządzenie iPAD SP1 po przyklejeniu elektrod samo diagnozuje pacjenta. Decyzję o wykonaniu wstrząsu (w przypadku wykrycia migotania komór) podejmuje maszyna, a ratownik musi jedynie wcisnąć migający przycisk wyładowania. Dzięki temu urządzenie z powodzeniem sprawdzi się w:

- **Jednostkach Straży Pożarnej i OSP** (ze względu na normę militarną MIL-STD-810G i odporność na drgania np. w wozie strażackim lub helikopterze).
- **Firmach, halach produkcyjnych i biurach** (ochrona pracowników).
- **Miejscach użyteczności publicznej** (szkoły, urzędy, dworce).

4. Często zadawane pytania (FAQ)

Czy do iPAD SP1 muszę dokupić elektrody pediatryczne?

Nie ma takiej konieczności. Zestaw zawiera uniwersalne elektrody dla dorosłych (o żywotności do 30 miesięcy). W przypadku konieczności ratowania dziecka wystarczy przesunąć fizyczny przełącznik na obudowie – urządzenie samo zmniejszy energię wstrząsu. Elektrody pediatryczne (mniejsze) dostępne są jedynie opcjonalnie.

Czy defibrylatora AED można używać w deszczu?

Tak, pogoda nie jest przeciwwskazaniem do defibrylacji. iPAD SP1 posiada bardzo wysoki stopień szczelności IP55. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, aby przed przyklejeniem elektrod wytrzeć i osuszyć klatkę piersiową pacjenta.

Firma:
KADIMEX Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wólczyńska 290,
01-919 Warszawa

Tel.:
tel. (+48) 22 864 99 66
fax. (+48) 22 835 57 85

E-mail:
biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

Numer konta bankowego:
Milenium Bank S.A.
98 1160 2202 0000 0003 7361 2485

Dlaczego do defibrylatora dołącza się maszynkę do golenia?

Jeśli klatka piersiowa poszkodowanego jest silnie owłosiona, elektrody mogą nie przylegać do skóry prawidłowo, co zakłóci analizę rytmu EKG (iPAD SP1 analizuje odprowadzenie EKG II) lub uniemożliwi dostarczenie wstrząsu. Maszynka pozwala na szybkie przygotowanie skóry pacjenta.

W jakich sytuacjach NIE używać defibrylatora AED?

Nie należy stosować wyładowania w środowisku, w którym występują materiały i gazy łatwopalne (ryzyko wybuchu), ani gdy poszkodowany leży bezpośrednio w kałuży wody.

Zakupy w Kadimex – Twoje bezpieczeństwo to nasz priorytet

Wybierając sprzęt w sklepie Kadimex, stawiasz na najwyższą jakość i sprawdzone rozwiązania. Defibrylator CU Medical iPAD SP1 dostarczany jest w komplecie z torbą transportową, baterią litową oraz elektrodami. Zmień zasady gry o ludzkie życie i wyposaż swój obiekt lub jednostkę w niezawodny sprzęt ratunkowy.

Firma:
KADIMEX Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wólczyńska 290,
01-919 Warszawa

Tel.:
tel. (+48) 22 864 99 66
fax. (+48) 22 835 57 85

E-mail:
biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

Numer konta bankowego:
Milenium Bank S.A.
98 1160 2202 0000 0003 7361 2485